



BoucleMagnetique.fr

Boucle magnétique MOBILE



Cette boucle magnétique mobile est adaptée aux lieux recevant du public (guichet, point de vente, accueil, cabinet...), afin de faciliter la communication avec les personnes déficientes auditives.

La mise en service est simple et rapide. Il suffit de placer la boucle magnétique entre vous et la personne appareillée qui aura réglé ses appareils sur la position «T» ou «MT». Pour les personnes non appareillées, il est possible d'utiliser le combiné raccordé à la boucle.

La captation de la voix s'effectue par le microphone de table inclus qui permet d'éviter l'effet Larsen et une utilisation dans de mauvaises conditions acoustiques.

La sensibilité du microphone de table peut être ajustée par le potentiomètre de la boucle.

Le microphone de table est alimenté par la boucle et ne nécessite pas de piles.

Le combiné et le microphone de table sont actifs dès que la boucle est mise en marche.

Pour une utilisation fixe, la boucle peut être vissée sur le comptoir, au mur ou cadénassé par un antivol.



La boucle magnétique MOBILE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ✓ Alimentation : Bloc-secteur 100 - 240 VAC 50 - 60 Hz ou sur batterie intégrée 12 V
- ✓ Autonomie : 6 h sur batterie
- ✓ Portée du champ magnétique : 1 m
- ✓ Microphone intégré : Pression acoustique jusqu'à 60 dB max

ENTRÉES /SORTIES

- ✓ Entrée microphone externe Jack 3,5 mm
- ✓ Sortie casque Jack 3,5 mm

RÉGLAGE ET AFFICHAGE

- ✓ Boutons Marche et Arrêt
- ✓ Réglage du niveau de l'entrée microphone
- ✓ Réglage du volume de la sortie casque
- ✓ Sélection micro interne / micro externe/ micro interne et externe
- ✓ Fixation sur le comptoir par 4 vis, mural ou par antivol
- ✓ Dimensions (H x l x P : 200 x 185 x 70 mm)
- ✓ Bloc-secteur
- ✓ Poids : 635 g (batterie incluse)

QUELQUES RÉFÉRENCES...



VILLE DE COGNAC



...et bien d'autres sur notre site bouclemagnetique.fr